



①検体(唾液)の採取

起床後すぐ(うがい・歯磨き・飲食の前に)、
喉の奥から唾液を絞り出すように口内に溜めてキットの紙カップに吐き出します


②検体と抽出液を混ぜる

紙カップに溜めた唾液をスポイトで充填ライン(2ml)まで吸い上げます
チューブの蓋を開けて、抽出液に検体を入れたら、中部の蓋を閉めてしっかり混ぜます



③キット本体に滴下

キット本体を水平な台の上に置き、サンプル穴に②のチューブ溶液を3滴滴下します

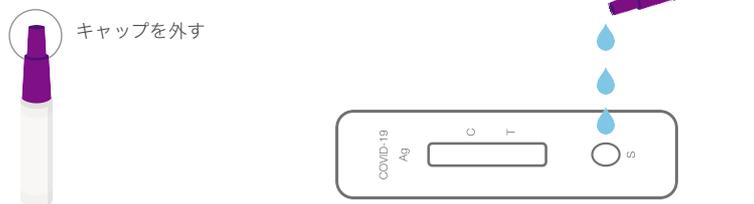

④結果の確認

10~15分後、結果を確認します
*30分後以降の結果は無効です

陽性		陰性		無効	
	C		C		C
	T		T		T

[製品概要]

製品名：COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)
測定方法：イムノクロマト法（金コロイド凝集法）
使用目的：後部口腔唾液中のSARS-CoV-2を検出
判定時間：検体滴下後10~15分
保存方法：2~30℃ 直射日光・高温多湿を避ける
有効期限：箱に記載(製造日より1年)
精度：98.5% 感度：96.1% 特異度：99.0%

[製造元]

Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd.
10th Floor, Administration Building, NO.519,Xing Guo RD., Yuhang
Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang,
China, 311188
URL: <http://www.joinstar.cn> E-mail: market@joinstar.cn
Tel: 0086-571-89023160 Fax: 0086-571-89028135

[注意事項]

本製品は CE 認証を取得しており、世界各国の医療機関等で体外診断用医薬品として活用されています。日本国内では研究開発用としての使用に限られますので、検査結果を診断に使用しないでください。
最終判定には PCR 検査との併用が必要となりますので、予めご理解の上、使用してください。

[輸入]

Thermal Camera JAPAN Tel: 06-6485-3333

E-mail: customer@thermal-camera.co.jp

[販売]

[用語説明]

- ・ COVID-19：新型コロナウイルス感染症の正式名称
- ・ SARS-CoV-2：新型コロナウイルスの正式名称